



### **Estimado cliente:**

Favor de tomar en cuenta la presente imagen para la correcta toma de la muestra MOCO NASAL para determinación de antígeno del virus de la influenza, ya que la calidad de la muestra es determinante en la confiabilidad del resultado.

### **PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA:**

1. Seleccionar la fosa nasal con mayor secreción.
2. Introducir el hisopo en la fosa nasal con movimiento rotatorio suave dirigiéndolo según se muestra en la imagen.
3. Realizar raspado suave con movimiento rotando del hisopo.
4. Extraer el hisopo con movimiento rotatorio suave y colocarlo en tubo estéril de plástico cerrándolo adecuadamente.
5. Enviar la muestra usando gel refrigerante para mantener el tubo frío. El hisopo con la muestra en el tubo es estable por 24 horas entre 2-8 °C.



### **NOTAS:**

1. Usar sólo el hisopo proporcionado
2. No tomar la muestra por lavado nasofaríngeo o por aspiración
3. Las muestras con sangre excesiva pueden interferir con la interpretación del resultado
4. **Enviar muestra con el código 36**
5. El precio de la prueba: \$220.00 mas IVA
6. Tiempo de proceso: 1 día

Las dudas o comentarios las atiende el departamento de Asesoría Biomédica.

[www.laserlab.com.mx](http://www.laserlab.com.mx)